

®JRENUM Gehörschutz

Der nach Maß individuell angepasste Gehörschutz

Die meisten herkömmlichen Gehörschutzvorrichtungen schützen entweder ungenügend oder filtern zu wenig selektiv, das heisst sie dämmen auch unschädliche Geräusche wie menschliche Stimmen, die man aus Sicherheitsgründen hören sollte. Oder sie behindern den Arbeitenden.

®JRENUM kann auch in Schmuck-Ohrstücken mit Schmucksteinen geliefert werden.



Die Alternative, die alle diese Probleme löst, ist ®JRENUM.

®JRENUM ist äusserst unauffällig und behindert den Träger nicht bei der Arbeit. Die verschiedenen einbaubaren Filter haben verschiedene Dämpfungspotentiale (siehe Rückseite), und können auf den jeweiligen Arbeitsplatz abgestimmt werden.

®JRENUM dämmt den Lärm selektiv. Der lebenswichtige Stereoeffekt (Richtungshören) bleibt weitgehend erhalten.

®JRENUM isoliert nicht! Nur der Sie schädigende Lärm wird ausgefiltert. Sie können sich mit Ihrem Partner normal unterhalten.



LD-10



LD-14



LD-16



LD-18



LD-20



LD-22



LD-24




LD-26



®JRENUM Gehörschutz

Der nach Maß individuell angepasste Gehörschutz

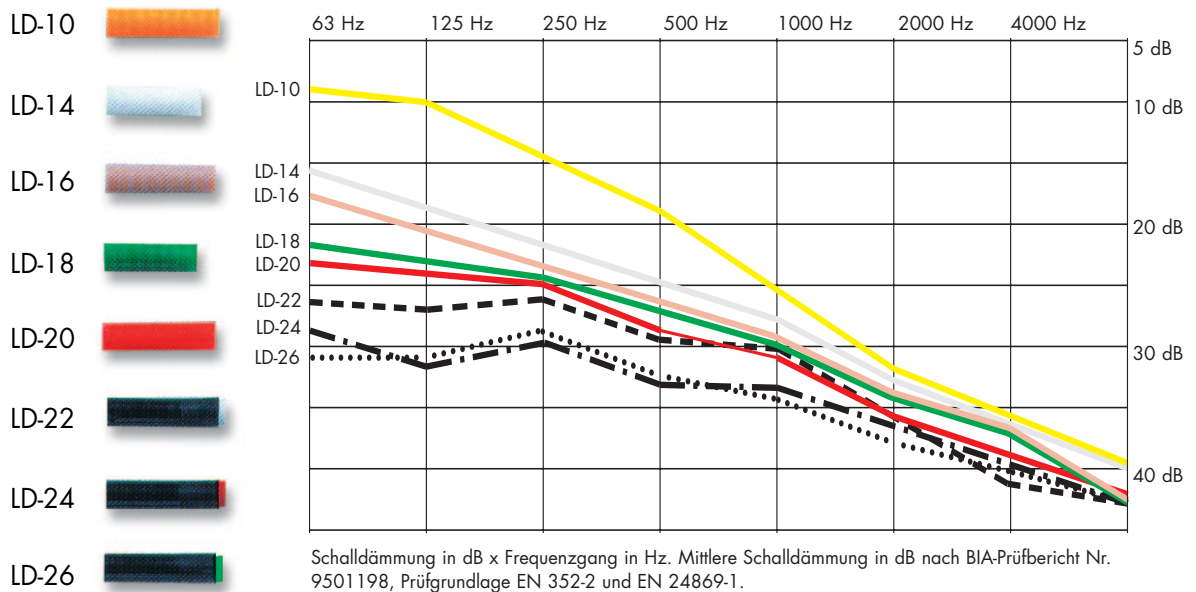

Gebrauchs- und Pflegeanleitung

Bewahren Sie ®JRENUM in dem mitgelieferten Etui auf.

Zum richtigen Einsetzen in Ihr Ohr fassen Sie mit Daumen und Zeigefinger den Griff an. Setzen Sie den Gehörschutz mit einer leichten Drehbewegung in den Gehörgang ein. Bitte achten Sie auf die richtige Seite. Der rechte Gehörschutz hat einen roten, der linke einen blauen Punkt neben dem Griff, oder jede Seite ist in einer anderen Farbe gehalten. Nur wenn Sie ®JRENUM sorgfältig einsetzen und im Lärm ohne Unterbrechung tragen, kann der Gehörschutz seine Schutzwirkung erreichen. Wenn Sie ihn im Lärm auch nur für kurze Zeit absetzen, gefährden Sie Ihr Gehör.

Pflege

Sie sollten ®JRENUM nach jedem Gebrauch reinigen. Da der Gehörschutz aus Polyacryl oder Silikon besteht, ist die Reinigung sehr einfach. Sie können dafür lauwarmes Wasser oder ein dafür vorgesehene Reinigungsmittel verwenden. Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel. ®JRENUM kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden.

Wir haben den Gehörschutz mit einem hautfreundliche Lack überzogen. Wenn Sie aber beim Tragen des Gehörschutzes einen Juckreiz spüren, könnte dies eine Überreaktion der Haut gegen das Material (Polyacryl) sein.

Gehen Sie dann vorsorglich zu einem HNO-Arzt, und lassen Sie Ihr Ohr untersuchen.

Achtung!

Der Filter in diesem Gehörschutz darf nachträglich nur durch den Lieferanten geändert werden.

K. Wichmann
Lengfelder Strasse 29
93356 Teugn
Tel.: 09 405 - 9 5 6 6 3 3 3
Fax: 09 405 - 9 5 6 6 3 3 4
Email: info@k-wichmann.de

wichmann